
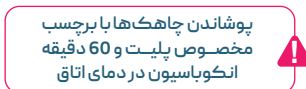
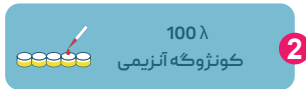
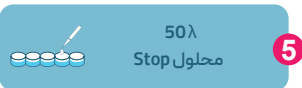


از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

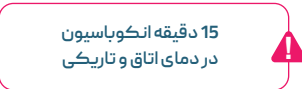

نمونه	سرم (ترجیحاً ناشتا)
آماده‌سازی محلول‌ها محلول شستشو: 20 میلی‌لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد. محلول رنگزا: محلول‌های رنگزا A و B با حجم‌های مساوی (1:1) مخلوط و قبل از مصرف به مدت 10 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه شود.	
مقادیر مرجع	
Reference Intervals (mIU/mL)	
Follicular Phase (Females)	3 - 12
Midcycle Peak (Females)	8 - 22
Luteal Phase (Females)	2 - 12
Postmenopausal (Females)	35 - 151
Males	1 - 14
نکات غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است.	
Rev (B ₀): 1402/04/01	