



100 λ
محلول رنگزا (A+B)

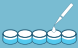

4

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

15 دقیقه انکوباسیون
در دمای اتاق و تاریکی



50 λ
محلول Stop



5


20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



خوانش با فیلتر 450 nm
فیلتر فرانس 630 nm
خوانش حداکثر تا مدت 15 دقیقه

6

25 λ
نمونه، کنترل، کالیبراتور



1

100 λ
کونژوگه آنزیمی




2

30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



پوشاندن چاهک‌ها با برچسب
مخصوص پلیت و 60 دقیقه
انکوباسیون در دمای اتاق



تخلیه چاهک‌ها
و 3 بار شستشو
هر بار 300 λ



3

نمونه	سرم (ترجیحاً ناشتا)	
آماده‌سازی محلول‌ها		
محلول شستشو: 20 میلی‌لیتر از محلول شستشو (50X) به 980 میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد.		
محلول رنگزا: محلول‌های رنگزا A و B با حجم‌های مساوی (1:1) مخلوط و قبل از مصرف به مدت 10 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه شود.		
مقادیر مرجع		
Sexuality	Age	Normal Range (ng/mL)
Females	<13	0 - 10
Females	(13 - 18)	0 - 51
Females	>18	1.2 - 28.5
Postmenopausal Females	-	1.5 - 18.5
Males	(13 - 18)	5 - 25
Males	>18	1.8 - 20
نکات		
غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است.		
Rev (B ₀):1402/04/01		