

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

انکوباسیون به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی





20 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز



30 ثانیه حرکت آرام روی سطح میز

پوشاندن چاهک‌ها با برجسب مخصوص و انکوباسیون به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق

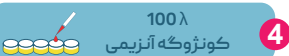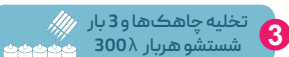

از تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید

پوشاندن چاهک‌ها با برجسب مخصوص و انکوباسیون به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق

نمونه سرم (ترجیحاً ناشتا)

آماده‌سازی محلول‌ها

محلول شستشو: 20 میلی‌لیتر از محلول شستشو (50X) را به 980 میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه اضافه کنید / نگهداری در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد.

محلول رنگزا: قبل از شروع استفاده از کیت، کل حجم محلول رنگزا B (ویال روشن) را داخل محلول رنگزا A (ویال تیره) خالی نمایید و برای انجام تست تا پایان مصرف کیت استفاده نمایید. در صورت مشاهده رنگ آبی و یا کدورت در محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

مقادیر مرجع

جمعیت بالغین نرمال	0-55 (μIU/mL)
1 μIU/mL = 0.333 ng/mL	

نکات

غلظت کالیبراتورها و کنترل (ها) در برگه COA درج شده است. چنانچه از دستگاه‌های الایزا پروسسور استفاده می‌کنید، می‌توانید تنظیمات دستگاه خود را از شرکت دریافت نمایید.

Rev (C₀):1403/07/24